

为您提供实验室整体解决方案

YOUR RELIABLE PARTNER IN LIFE SCIENCE



— 股票代码:688026 —

广州洁特生物过滤股份有限公司

地址:广州市黄埔区永和经济技术开发区斗塘路1号

电话:400-8717-688

邮箱:customer@jetbiofil.com



— 股票代码:688026 —

为您提供实验室整体解决方案

## 辅助生殖用培养皿 产品说明书

规格:中心孔、四孔板、平底35mm、平底60mm、平底90mm



广州洁特生物过滤股份有限公司



### 产品名称与型号规格

产品名称	型号	规格
辅助生殖用培养皿	中心孔	Φ6cm
	四孔板	4孔
	平底35	Φ3.5cm
	平底60	Φ6cm
	平底90	Φ9cm

### 结构及组成

本产品由聚苯乙烯制成,由培养皿和培养皿盖组成,无涂层,无菌提供,一次性使用。

### 适用范围

用于体外环境下操作、储存或辅助孵化人类生殖细胞以及胚胎。

### 产品性能

- 1 产品经辐照灭菌;
- 2 产品无热原;
- 3 内毒素不超过0.5EU/皿。
- 4 囊胚形成率>80%。供试品组与阴性对照组相比,良好囊胚细胞数应无明显差异。

### 禁忌证

无

### 注意事项、警示以及提示的内容

- 1.本产品为一次性使用无菌产品,不得重复使用,不得二次灭菌。
- 2.如发现包装破损,请勿使用。
- 3.产品使用后应按照当地医疗器械废物管理规定进行处理。
- 4.使用前请详细阅读说明书。

### 使用说明

- 1.使用前请检查包装是否有破损,如有破损,请勿使用。
- 2.按指示打开包装袋,并取出产品。
- 3.产品需要在具备条件的洁净实验室内进行使用。

### 产品维护和保养方法,特殊储存、运输条件、方法

- 1.产品应贮存在相对湿度不大于80%,温度0-30°C,通风和无腐蚀性气体和物质的室内;
- 2.贮藏及搬运过程应避免与硬物发生碰撞,避免剧烈挤压、受力和震动。

### 生产日期、失效日期

生产日期和失效日期见包装标签

### 注意事项

图例	内容	图例	内容	图例	内容
	制造商		生产日期		有效期
	易碎物品 小心搬运		怕晒		怕雨
	不得二次使用		不得二次灭菌		经辐射灭菌
	无热原		查阅使用说明		如包装破损 切勿使用
	批次代码		警告	/	/

【注册人/生产企业名称/售后服务单位】:广州洁特生物过滤股份有限公司

【住所/生产地址】:广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】:粤械注准20232181838

【生产许可证编号】:粤药监械生产许20235285号

【注册人/生产企业联系方式】:服务电话:020-32811888 传真:020-32811888-802

邮政编码:511356 网址:www.jetbiofil.com

【说明书编制或者修订日期】:2023年11月15日

【说明书版本】:A1